

DOS AÑOS DE GARANTÍA

Cualquier Descongelador (CITO Thaw) que se encuentre defectuoso en materiales o mano de obra durante 2 años desde la fecha de compra será reparado o sustituido gratuitamente, el cliente solo paga por el envío a la fábrica. La garantía no incluye roturas del Termo de vidrio interno.

Note: No use Generadores portátiles con los Modelos AI-CT-D-12-120 AI-CT-D-12-220

Mantenga conexiones eléctricas limpias y secas

INSTRUCCIONES DE ENVÍO:

Empaque bien para evitar daños, etiquete

FRÁGIL - VIDRIO FRAGILE - GLASS

y envíelo a:



N8779 COUNTY ROAD X • P.O. BOX 90
WATERTOWN, WI 53094 U.S.A.

TEL: (920) 261-6646 • FAX: (920) 261-1350

www.citoai.com • sales@citoai.com

AI-CT-D-I-4-SP-A-1

FUNCIONAMIENTO

1. Llene el Descongelador CITO con agua potable limpia. Enchufe el cable en la fuente de energía correcta como se indica en la base de la unidad.

Espere a que el descongelador caliente a la temperatura deseada. La temperatura del agua de inicio determina exactamente el tiempo de calentamiento de aproximadamente 2°F/1.1°C por minuto.

Temp. del agua 10°C a 96.5°F/36°C = aprox. 23 min.

Temp. del agua 15°C a 96.5°F/36°C = aprox. 18 min.

Temp. del agua 21°C a 96.5°F/36°C = aprox. 13 min.

Temp. del agua 26°C a 96.5°F/36°C = aprox. 8 min

2. El LED verde debe de estar encendido, indicando que la unidad está lista a la temperatura deseada.

3. Agite el agua, tomando el colador y moviéndola hacia arriba y abajo varias veces para asegurar que la temperatura del agua sea constante a través del baño de agua.



MANUAL DE INSTRUCCIONES



96.5°F / 36°C

Gracias por elegir el **Descongelador Digital CITO**. Este dispositivo electrónico calienta y mantiene automáticamente la temperatura precisa del agua.

El Descongelador CITO fue diseñado para darle años de servicio sin problemas

PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR TEMP. DEL AGUA

4. Con la temperatura correcta del agua ahora está listo el Descongelador para descongelar el semen.

5. NOTA: Las unidades nuevas del Descongelador CITO tienen una perilla interna para ajustar la temperatura. Su Descongelador ha sido calibrado en fábrica para 96.5°F/36°C. Sin embargo, si usted desea cambiar la temperatura programada, puede reajustarlo removiendo los 7 tornillos de la parte inferior de la unidad y ajuste la perilla en sentido de las manecillas del reloj para calentar y hacia la izquierda para temperaturas más frías. Gire la perilla de ajuste de temperatura un poco a la vez y permita que la unidad se estabilice antes de comprobar la temperatura de nuevo.

6. Si la unidad no mantiene la temperatura adecuada, devuelva la unidad para su reparación o reemplazo. Envíelo a la fábrica con sus comentarios y su dirección.

FUNCIONAMIENTO

1. Llene el Descongelador CITO con agua potable limpia. Enchufe el cable en la fuente de energía correcta como se indica en la base de la unidad. Espere a que el descongelador caliente a la temperatura deseada. La temperatura del agua de inicio determina exactamente el tiempo de calentamiento de aproximadamente 2°F/1.1°C por minuto.

Temp. del agua 10°C a 96.5°F/36°C = aprox. 23 min.
Temp. del agua 15°C a 96.5°F/36°C = aprox. 18 min.
Temp. del agua 21°C a 96.5°F/36°C = aprox. 13 min.
Temp. del agua 26°C a 96.5°F/36°C = aprox. 8 min

2. El LED verde debe de estar encendido, indicando que la unidad está lista a la temperatura deseada.

3. Agite el agua, tomando el colador y moviéndola hacia arriba y abajo varias veces para asegurar que la temperatura del agua sea constante a través del baño de agua.

PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR TEMP. DEL AGUA

4. Con la temperatura correcta del agua ahora está listo el Descongelador para descongelar el semen.

5. NOTA: Las unidades nuevas del Descongelador CITO tienen una perilla interna para ajustar la temperatura. Su Descongelador ha sido calibrado en fábrica para 96.5°F/36°C. Sin embargo, si usted desea cambiar la temperatura programada, puede reajustarlo removiendo los 7 tornillos de la parte inferior de la unidad y ajuste la perilla en sentido de las manecillas del reloj para calentar y hacia la izquierda para temperaturas más frías. Gire la perilla de ajuste de temperatura un poco a la vez y permita que la unidad se establezca antes de comprobar la temperatura de nuevo.

6. Si la unidad no mantiene la temperatura adecuada, devuelva la unidad para su reparación o reemplazo. Envíelo a la fábrica con sus comentarios y su dirección.

DOS AÑOS DE GARANTÍA

Cualquier Descongelador (CITO Thaw) que se encuentre defectuoso en materiales o mano de obra durante 2 años desde la fecha de compra será reparado o sustituido gratuitamente, el cliente solo paga por el envío a la fábrica. La garantía no incluye roturas del Termo de vidrio interno.

Note: No use Generadores portátiles con los Modelos AI-CT-D-12-120 AI-CT-D-12-220

Mantenga conexiones eléctricas limpias y secas

INSTRUCCIONES DE ENVÍO:

Empaque bien para evitar daños, etiquete

FRÁGIL - VIDRIO FRAGILE - GLASS

y envíelo a:

CITO PRODUCTS, INC.

N8779 COUNTY ROAD X • P.O. BOX 90
WATERTOWN, WI 53094 U.S.A.

TEL: (920) 261-6646 • FAX: (920) 261-1350
www.citoai.com • sales@citoai.com

AI-CT-D-I-4-SP-A-1

CITO DESCONGELADOR
DIGITAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES



96.5°F / 36°C

Gracias por elegir el **Descongelador Digital CITO**. Este dispositivo electrónico calienta y mantiene automáticamente la temperatura precisa del agua.

El Descongelador CITO fue diseñado para darle años de servicio sin problemas